



MBT/SMB  
CU 375

STANDARD/LUSSO

## DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

(CITY NAME ) CITTA'.....

CLINICA : .....

MEDICO.....

NOME DELL'UTILIZZATRICE : .....

PROSSIMO APPUNTAMENTO PER CHECK UP.....

.....

DATA DELL'INSERIMENTO : .....

DATA DI RIMOZIONE : .....

### ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATRICE :

DOPO L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO SI POSSONO AVVERTIRE PER POCO TEMPO DEI PICCOLI CRAMPI ESSI POSSONO ESSERE CONTROLLATI CON DEGLI ANALGESICI O CON L'APPLICAZIONE DI UN PANNO CALDO SULL'ADDOME.

DOPO 4-6 SETTIMANE DALL'INTERVENTO EFFETTUARE UN CONTROLLO DAL PROPRIO MEDICO

DURANTE IL PRIMO MESE DALL'INSERIMENTO CONTROLLARE REGOLARMENTE IL FILO SPECIALMENTE DOPO IL CICLO E DOPO LE MESTRUAZIONI. SE IL FILO NON SI TROVA O E' PIU' CORTO O PIU' LUNGO DEL NORMALE INTERPELLARE IL MEDICO.

SE IL FILO NON SI TROVA O LA PARTE DI PLASTICA DEL DISPOSITIVO PUO' ESSERE TOCCATA CON LA MANO O SE IL DISPOSITIVO VIENE ESPULSO O SE SI SALTA UN CICLO INTERPELLARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO.

DOPO 3 MESI DALL'INSERIMENTO SI POSSONO VERIFICARE DELLE MINIME MACCHIE INTERMESTRUALI, SANGUINAMENTI, FLUSSI MESTRUALI PROLUNGATI O ACCRESCIUTI, SE CONTINUANO INTERPELLARE IL MEDICO

SE IL CICLO RITARDA PIU' DI 10 GIORNI E SI AVVERTONO SINTOMI DI GRAVIDANZA COME NAUSEA, SENI DOLENTI ETC. CONSULTARE IL MEDICO

SE SI AVVERTE UN DOLORE ADDOMINALE O DOLORE DURANTE IL RAPPORTO O INFEZIONI COME GONORREA, FEBBRE, BRIVIDI O INDISPONIZIONI INTERPELLARE IL PROPRIO MEDICO

CONSULTARE IL MEDICO PER UN CONTROLLO O PER LA SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO IL DISPOSITIVO PROTEGGE DA UNA GRAVIDANZA PER 5 ANNI

COMUNQUE ANCHE CON L'UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO C'E' UNA PICCOLA PROBABILITA' DI UNA GRAVIDANZA. SE CIO' DOVESSE AVVENIRE RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE IL DISPOSITIVO.

### TEMPO DI RIMOZIONE

IL DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO CU 375 DEVE ESSERE SOSTITUITO OGNI 5 ANNI

### MODALITA' PER LA RIMOZIONE

PREPARARE LA VULVA, INSERIRE LO SPECULUM E PULIRE LA CERVICE COME EFFETTUATO PER L'INSERIMENTO. PER FACILITARE LA RIMOZIONE TENERE SEMPRE A PORTATA UN TENACOLO PER SEGUIRE L'ASSE DELL'UTERO IN MODO DA MINIMIZZARE EVENTUALI ROTTURE LATERALI. UTILIZZARE UN FORCIPE PER PRENDERE I DUE FILI DEL DISPOSITIVO IL PIU' VICINO POSSIBILE ALLA CERVICE. APPLICANDO UNA TRAZIONE REGOLARE E LENTA CON IL TENACOLO IL DISPOSITIVO DOVREBBE ESSERE RIMOSSO FACILMENTE DALL'UTERO. NON APPLICARE UNA FORZA ECCESSIVA.

### DIFFICOLTA' NEL RIMUOVERE E ROTTURE DURANTE LA RIMOZIONE

ALCUNE VOLTE CI POTREBBERO ESSERE DELLE DIFFICOLTA' NEL RIMUOVERE IL DISPOSITIVO. NELL'EVENTUALITA' CHE UNO SFORZO MAGGIORE E' NECESSARIO PER LA RIMOZIONE, QUESTO PUO' SIGNIFICARE CHE IL DISPOSITIVO E' BLOCCATO CI SONO STATI DEI CASI DI ROTTURE DI PARTI DEL DISPOSITIVO (PARTICOLARMENTE LE ALETTE) NELLA CAVITA' UTERINA QUANDO SI AVVERTE UNA MAGGIORE RESISTENZA NEL RIMUOVERLO.

QUESTI FRAMMENTI POSSONO ESSERE EPULSI SENZA DOLORE DURANTE IL CICLO ED I FRAMMENTI POSSONO ESSERE LIBERATI CON CONTRAZIONI UTERINE. CI SONO STATI DEI RARI CASI DI ROTTURE NON CAUSATI DA POSIZIONAMENTO

SE IL DISPOSITIVO NON PUO' ESSERE ASPORTATO CON UNO SFORZO NORMALE O SE DEI FRAMMENTI SONO PRESENTI SI CONSIGLIA UNA DIAGNOSI CON ULTRASUONI PER ESCLUDERE PERFORAZIONI O BLOCCO. QUESTI FRAMMENTI POSSONO ESSERE LOCALIZZATI CON ULTRASUONI O ISTEROSCOPIA. QUEST'ULTIMA TECNICA CONSENTE ANCHE DI RIMUOVERLI

COMUNQUE LA PRATICA INDICA CHE LA RIMOZIONE DEI FRAMMENTI CON DELLE "CURETTE", SIA LOCALIZZATE O NON, AVVIENE CON SUCCESSO NELLA MAGGIORANZA DEI CASI. PROVARE SEMPRE A RIMUOVERE I FRAMMENTI

### UNO SPOSTAMENTO DEL DISPOSITIVO

RARAMENTE IL DISPOSITIVO PUO' OLTREPASSARE LA PARETE UTERINA. SE CIO' ACCADE E' NECESSARIO UN INTERVENTO PER ASPORTARE IL DISPOSITIVO E RIPARARE LA PARETE UTERINA.

### ESPULSIONE

QUALCHE VOLTA IL DISPOSITIVO PUO' ESSERE EPULSO A CAUSA DI MOLTO FLUSSO DELLE MESTRUAZIONI E DATO CHE L'UTERO RIMANE PIU' APERTO DURANTE LE STESSE. SE CIO' NON VIENE RISCONTRATO SI PUO' AVERE UNA GRAVIDANZA

### VISITA MEDICA

PRIMA DI UTILIZZARE UNA SPIRALE VALUTARE TUTTE LE CONTROINDICAZIONI CHE RISULTANO DA UNA ANAMNESI E ESAME FISICO DELLA DONNA.

L'ESAME DEVE INCLUDERE UNA VISITA GINECOLOGICA, UNO STRISCIO CERVICALE E SE POSSIBILE TEST DIAGNOSTICI PER ESCLUDERE MALATTIE TRASMESSE SESSUALMENTE.

DOPO L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO IMMEDIATAMENTE DOPO IL CICLO, O DOPO UN ABORTO O DOPO UN PARTO SI DOVRA' ESEGUIRE UNA VISITA MEDICA COMUNQUE MENSILMENTE NEI PRIMI TRE MESI.

IN SEGUITO E' CONSIGLIABILE UN CONTROLLO REGOLARE P. ES. OGNI 6 MESI

SE IN UNA DONNA, CHE NON HA AVVERTITO L'ESPULSIONE DEL DISPOSITIVO, NON SI TROVANO I FILI, E' NECESSARIO EFFETTUARE UN CONTROLLO PER ESCLUDERE UNA PERFORAZIONE O UN'ESPULSIONE NON AVVERTITA. UTILIZZARE GLI ULTRASUONI PER INDIVIDUARE IL DISPOSITIVO

### DATA DI SCADENZA

5 ANNI



MBT/SMB  
CU 375

STANDARD/LUSSO

## DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

LA SPIRALE NON PROTEGGE DA MALATTIE  
TRASMESSE SESSUALMENTE/AIDS

### ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATRICE :

#### INFORMAZIONI GENERALI

I DISPOSITIVI CONTRACCETTIVI INTRAUTERINI CU 375 SONO PRODOTTI CON MATERIALI DI COMPOSTI DI POLIETILENE ED HANNO DUE BRACCIA FLESSIBILI CON SPERONI (ALETTE). UN SOTTILE FILO DI RAME SPIRALIZZATO INTORNO AD UN'ANIMA CREA UNA SUPERFICIE DI 375 MM<sup>2</sup> LE BRACCIA FLESSIBILI

ASSICURANO CHE LA SPIRALE CU 375 RIMANGA IL PIU' POSSIBILE VICINO AL "FUNDUS" PER EVITARE TRAUMI ALLA CAVITA' UTERINA

UN FILO DI NAYLON E' ATTACCATO AL GAMBO. L'AZIONE CONTRACCETTIVA DELLA SPIRALE E' DOVUTA PROBABILMENTE A MOLTE REAZIONI ESTRANEE CON L'ENDOMETRIO UTERINO E ALLA PRESENZA DI RAME.

#### INDICAZIONI

PER CONTRACCEZIONI UTERINE DI DONNE FERTILI. LA SPIRALE CU 375 E' MONOUSO E DEVE ESSERE INSERITA DA UN MEDICO QUALIFICATO

#### RIUTILIZZO

NON RIUTILIZZARE IL DISPOSITIVO. QUESTO PUO' CAUSARE INFEZIONI DEL BASSO VENTRE CON CONSEGUENTI INFERTILITA'

CRITERI DI SELEZIONE DEL DISPOSITIVO TRA STANDARD E LUSSO / DIMENSIONI

Dimensione/modello	Larghezza orizzontale	Lunghezza verticale	Intervallo di misura
Lusso	19 ± 0.3 mm	29.5 ± 0.5 mm	5 - 8 cm
Standard	19 ± 0.3 mm	35.5 ± 1.0 mm	6 - 9 cm

QUESTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE. LA DECISIONE FINALE PER LA SCELTA DELLA SPIRALE SPETTA AL GINECOLOGO/MEDICO

### MOMENTO DELL'INSERIMENTO

IL MOMENTO IDEALE PER L'INSERIMENTO DI UNA SPIRALE E' NEGLI ULTIMI GIORNI DEL FLUSSO MESTRUALE O I PRIMI GIORNI DOPO LO STESSO. QUESTO PER RIDURRE IL RISCHIO DI UNA POSSIBILE GRAVIDANZA NON DIAGNOSTICATA. LA SPIRALE PUO' ANCHE ESSERE INSERITA IMMEDIATAMENTE (ENTRO 10 MINUTI) DOPO UN ABORTO OD UN POSTPARTO MA IN QUESTO CASO LE POSSIBILITA' DI UNA GRAVIDANZA, DI UNO SPOSTAMENTO O DI UNA ESPULSIONE SONO MAGGIORI.

L'INSERIMENTO DOPO ABORTO O PARTO NON PROVOCANO INVOLUZIONE DELL'UTERO NE' DANNEGGIANO L'ALLATTAMENTO

SE L'INSERIMENTO DOPO ABORTO O PARTO NON E' FATTO IMMEDIATAMENTE E' PREFERIBILE ASPETTARE FINO ALLA COMPLETA INVOLUZIONE CIOE' DOPO 6 SETTIMANE DAL PARTO O ABORTO.

DOPO PARTO CON TAGLIO CESAREO NON INSERIRE LA SPIRALE PRIMA DI 12 SETTIMANE

### PROCEDURE PER L'INSERIMENTO

- EFFETTUARE UNA VISITA A DUE MANI PER DETERMINARE LA VERSIONE, FLESSIONE E L'ASSE UTERINA
- CON UNO SPECULUM ALLARGARE LA CERVICE. DISINFETTARE LE PARETI DELLA VAGINA E CERVICE CON UN BATUFOLO DI COTONE STERILE IMBEVUTO DI LIQUIDO ANTISEPTICO (FIG. A). ASPORTARE EVENTUALI SECREZIONI DELLA PARTE ESTERNA
- PRENDERE CON UN TENACOLO IL LABBRIO ANTERIORE DELLA CERVICE, TIRANDOLO IN MODO DA RADDRIZZARE L'ASSE UTERINA ED EVITARE DELLE LACERAZIONI (FIG B) CONTRAZIONI INVOLONTARIE NELL'APPLICARE IL TENACOLO POSSONO ESSERE EVITATE CON UNA INIEZIONE DI UN ANESTETICO NELLA LABBRIO ANTERIORE O NEL BLOCCO PARACERVICALE

**SMB CORPORATION OF INDIA**  
(An ISO 9001 : 2008 / ISO 13485 : 2003 Certified Company)  
13, 33-36, Prem Industrial Estate, Jogeshwari (E), Mumbai 400 060, India  
E-mail : sales@smbcorp.com | Website : www.smbcorp.com  
Mfg. Lic. No. 99

**ECTREP** Obelis S.A, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax : +(32) 2.732.60.03 • E-Mail : mail@obelis.net  
Rev. 00 Dated : 11.4.2016

**SMB CORPORATION OF INDIA**  
(An ISO 9001 : 2008 / ISO 13485 : 2003 Certified Company)  
13, 33-36, Prem Industrial Estate, Jogeshwari (E), Mumbai 400 060, India  
E-mail : sales@smbcorp.com | Website : www.smbcorp.com  
Mfg. Lic. No. 99

**ECTREP** Obelis S.A, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax : +(32) 2.732.60.03 • E-Mail : mail@obelis.net  
Rev. 00 Dated : 11.4.2016



4. MISURARE CON CAUTELE L'UTERO CON APPARECCHIO AD ULTRASUONI PER DETERMINARE LA PROFONDITA' E PER CONFERMARE LA DIREZIONE DELL'ASSE. SE SI AVVERTE UNA RESISTENZA NON NORMALE ALL'INTERNO, E' CONSIGLIABILE DILATARE GENTILMENTE IL CANALE CERVICALE DI 4-5 MM, UTILIZZANDO UN DILATATORE CONICO ANZICHE' ROTONDO. NEL CASO DI NON DISPONIBILITA' DI STRUMENTI ADATTI, IL SISTEMA AD ULTRASUONI PUO' DARE UN' IDEA DELLA CONFIGURAZIONE.

Figure A



Figure B



### INSERIMENTO DELLA SPIRALE CU 375

LA SPIRALE E' GIA' PREPARATA CON IL TUBO INTRODUTTORE. LE BRACCIA DELLA SPIRALE NON DEVONO ESSERE NEL TUBO. SONO SUFFICIENTEMENTE FLESSIBILI PER ADATTARSI AL CANALE CERVICALE

1. APRIRE IL SACCHETTO DALLA PARTE DOVE E' RIPIOTATO "OPEN" (APRIRE) (VEDI FIG. 1)

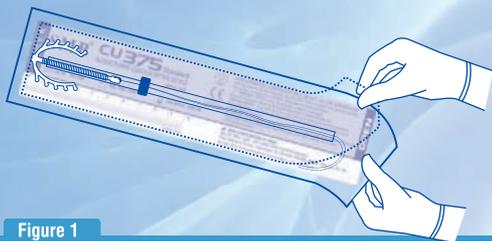


Figure 1

2. APRIRE LA CONFEZIONE IN MODO DA PRENDERE IL TUBO ED IL FILO, DALLA PARTE DISTALE, MA NON ASPORTARE LA SPIRALE DALLA CONFEZIONE. (VEDI FIG. 2)

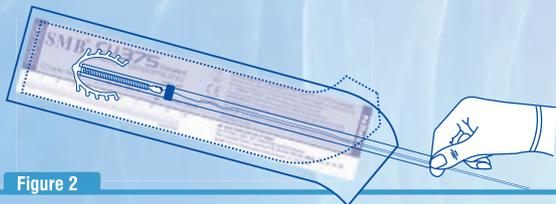


Figure 2

3. TENERE IL TUBO CON UNA MANO E MUOVERE LA SPIRALE FINO A CHE LA LUNGHEZZA CORRISPONDA ALLA PROFONDITA' DELL'UTERO IN CM (VEDI FIG. 3)

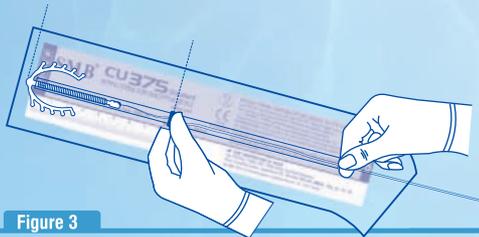


Figure 3

4. LAPARTE DISTALE DEL TUBO PUO' ESSERE AFFERRATA SENZA RISCHIO DI CONTAMINAZIONE. TENENDO CONEMPORANEAMENTE SIA IL TUBO CHE LA SPIRALE CI SI ASSICURA CHE LA SPIRALE NON ESCA E CADA DAL TUBO. ESTRARRE ORA LA SPIRALE DAL SACCHETTO.

5. CON GENTILEZZA INSERIRE LA SPIRALE NELL'UTERO (VEDI FIG. C) FINO A TOCCARE IL "FUNDUS" E CHE LO STOP APPOGGI SULLA PARTE ESTERNA DELLA CERVICE (VEDI FIG. D). MANTENERE LA TRAZIONE VERSO IL BASSO CON IL TENACOLO PER TENERE DRITTO L'ASSE UTERINO. NON FORZARE L'INTRODUZIONE DELLA SPIRALE.

INSUFFICIENZA NEL TENERE DRITTA L'ASSE DELL'UTERO PUO' CAUSARE, IN ALCUNI CASI, L'INSERIMENTO NEL SUBENDOMETRIO. QUESTO RISCHIO PUO' ESSERE RIDOTTO NEL TIRARE ADEGUATAMENTE LA CERVICE IN MODO DA RADDRIZZARE L'ASSE DELL'UTERO.

6. QUANDO LA SPIRALE TOCCA IL FUNDUS LA SPIRALE VIENE POSIZIONATA NELLA CAVITA' UTERINA CON L'ESTRARRE IL TUBO (VEDI FIG. E). DURANTE QUESTA PROCEDURA CONTINUARE AD APPLICARE TRAZIONE CON IL TENACOLO. NON E' NECESSARIA NESSUNA BARRETTA DI SPINTA. CONTROLLARE IL CANALE CERVICALE PER ASSICURARSI CHE LA CODA DELLA SPIRALE SIA COMPLETAMENTE ALL'INTERNO. TIRARE IL FILO DELLA SPIRALE IN MODO CHE SIA 2 O 3 CM FUORI.

7. E' NECESSARIO SEGUIRE CON PRECISIONE LA PROCEDURA DELL'INSERIMENTO IN MODO DA MINIMIZZARE L'INSERIMENTO NEL SUB ENDOMETRIO CHE PUO' PORTARE AD UN BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELL'ENDOMETRIO. SE CIO' DOVESSE ACCADERE, VA APPLICATA UNA FORZA PER RIMUOVERE LA SPIRALE DALLA PARTE SBAGLIATA. QUESTO POTREBBE PROVOCARE PERO' LA ROTTURA DELLE ALETTE DELLA SPIRALE. INOLTRE E' DIFFICILE CLINICAMENTE CONFERMARE IL POSIZIONAMENTO NELLA PARTE SUB-ENDOMETRIALE, ESSENDO NON OVVIO PER IL MEDICO NELL'INSERIRE LA SPIRALE E PER MANCANZA DI DOLORE PER IL PAZIENTE. IL CORRETTO INSERIMENTO DELLA SPIRALE RIDUCE LA ROTTURA DELLE ALETTE ED EVENTUALI PERFORAZIONI.


Figure C



Figure D



Figure E

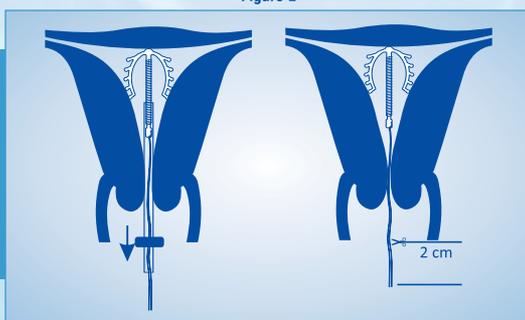

### OSSIDAZIONE DEL RAME

IL RAME UTILIZZATO PER LA SPIRALE PUO' APPARIRE SCOLORITO NELLA CONFEZIONE STERILE, MA QUESTO NON E' DA PREOCCUPARE. IL RAME SI OSSIDA A CAUSA DI ARIA CHE PENETRA ATTRAVERSO LA CONFEZIONE CAUSANDO SULLA SUPERFICE UN FILM DI OSSIDO O SOLFURO. LA CONFEZIONE DELLA SPIRALE DEVE ESSERE PERMEABILE PER LA STERILIZZAZIONE. SE LA CONFEZIONE NON E' DANNEGGIATA E LA DATA DI SCADENZA E' ANCORA VALIDA, LA SPIRALE E' STERILE ANCHE SE IL RAME E' OSSIDATO. STUDI CLINICI HANNO DIMOSTRATO CHE L'OSSIDAZIONE NON INCIDE SULLA SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLA SPIRALE.



MBT/SMB  
CU 375  
STANDARD/LUSSO



## DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO

LA SPIRALE NON PROTEGGE DA MALATTIE TRASMESSE SESSUALMENTE/AIDS

### INFORMAZIONE ALL'UTILIZZATORE (ITU)

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO INSERTO PRIMA DI DECIDERE SE UTILIZZARE LA SPIRALE MBT/SMB CU 375 RADIOPACA.

QUESTO INSERTO DA DELLE INFORMAZIONI CHE POSSONO AIUTARE A PRENDERE UNA DECISIONE NELL'UTILIZZARE LA SPIRALE CU 375. INOLTRE AIUTERA' AD UTILIZZARE LA SPIRALE IN MODO ADEGUATO E SICURO. SI CONSIGLIA DI TENERE IL FOGLIETTO E DI CONSULTARLO IN SEGUITO DURANTE L'USO DELLA SPIRALE IN MODO DA ESSERE INFORMATA E PRONTA SU EVENTUALI PROBLEMATICHE CHE ALL'INIZIO POSSONO NON PRESENTARSI. SE SI NECESSITA DI ALTRE INFORMAZIONI SI PREGA DI CONSULTARE IL PROPRIO GINECOLOGO.

### QUANDO E' CONSIGLIATO DI NON UTILIZZARE LA SPIRALE CU 375

IL PROPRIO GINECOLOGO EFFETTUERA' UNA VISITA DI CONTROLLO PER ACCERTARSI CHE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE LA SPIRALE CU375. INOLTRE E' NECESSARIO INFORMARE IL MEDICO DEL PROPRIO STATO DI SALUTE.

NON DEVE ESSERE USATA LA SPIRALE IN QUESTE CIRCOSTANZE :

1. TUMORE ALL'UTERO O CERVICE
2. SANGUINAMENTO VAGINALE DA VERIFICARE
3. GRAVIDANZA O SOSPETTO DI GRAVIDANZA
4. ANOMALIE DELL'UTERO O CERVICE; FIBROMI, (INGROSSAMENTI BENIGNI DELLE PARETI DELL'UTERO) ACCOMPAGNATE DA ABBONDANTE FLUSSO MESTRUALE; ENDOMETRIOSI (INGROSSAMENTO DEL TESSUTO UTERINO ANCHE AL LIVELLO DELLE TUBE DI FALLOPPIO)
5. INFEZIONI DEGLI ORGANI RIPRODUTTIVI, AD ECCEZIONE DELLA CANDIDOSI ( QUEST'ULTIMA E' UN'INFEZIONE CAUSATA DA FUNGHI DI CANDIDA ALBICANS DELLA PELLE
6. UN'INFEZIONE TRASMESSA SESSUALMENTE NEGLI ULTIMI 12MESI (AD ECCEZIONE DI INFEZIONI VAGINALI CAUSATE DA BATTERI, CANDIDOSI O DA HERPES VIRUS, EPATITE B O CITOMEGALOVIRUS.
7. PER UN ABORTO SPONTANEO DA INFEZIONE O ABORTO NEI TRE MESI ANTECEDENTI
8. MALATTIA INFIAMMATORIA PELVICA, INFEZIONE DELL'UTERO, DELLE TUBE DI FALLOPIO CON RICORRENTI RICADUTE
9. ALLERGIA AL RAME

### GRAVIDANZA EXTRAUTERINA

SE SI HA UNA GRAVIDANZA, PUR CON LA SPIRALE IN USO, QUESTA PUO' ESSERE UNA GRAVIDANZA EXTRAUTERINA ( UN OVULO FERTILIZZATO NON NELL'UTERO MA PROBABILMENTE NELLE TUBE DI FALLOPPIO). ANCHE SE LA SPIRALE EVITA UNA GRAVIDANZA EXTRAUTERINA, ESSA DA UNA PROTEZIONE SICURA CONTRO UNA NORMALE GRAVIDANZA. UNA GRAVIDANZA EXTRAUTERINA E' UNA SITUAZIONE SERIA E VA AFFRONTATA URGENTEMENTE CON IL PROPRIO MEDICO.

ALCUNI SEGNALE DI UNA GRAVIDANZA EXTRAUTERINA :

1. RITARDO DEL CICLO DI DUE O PIU' SETTIMANE, DOLORI ADDOMINALI DI UNA PARTE DEL BASSO VENTRE, QUESTO SEGUITO O NON DA SANGUINAMENTO, DOLORE DELLA SPALLA, VERTIGINI O SVENIMENTI
2. CONTATTARE SUBITO IL PROPRIO MEDICO SE SI AVVERTONO I SUDDETTI SEGNALE

### CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

I SEGUENTI EFFETTI COLLATERALI SONO STATI OSSERVATI NELL'USO DELLA SPIRALE CU375

- GRAVIDANZE NELL'UTERO O QUANDO LA SPIRALE E' STATA PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESPULSA
- SANGUINAMENTO O MACCHIE TRA UN CICLO ED UN ALTRO. MANCANZA O RITARDO DEL CICLO
- CICLO PROLUNGATO O ABBONDANTE. CICLO CON DOLORE. ANEMIA. DOLORE O CRAMPI NELL'INSERIRE LA SPIRALE O DOPO L'INSERIMENTO. PERDITE VAGINALI ED INFEZIONI, MALI DI TESTA, DOLORI ALLE GAMBE ED INDOLENZIMENTI, REAZIONI ALLERGICHE PER L'USO DEL RAME.