

## MAKLER® Counting Chamber - cod 50.109



### Caratteristiche uniche e vantaggi

Facile da usare	Conta da effettuare direttamente da liquido seminale fresco.
Risultati rapidi	Il numero di spermatozoi contati in ogni striscia di 10 caselle della griglia indica la loro concentrazione in milioni/mL.
Profondità ottimale	La profondità di 10 micron elimina sfocature e consente agli spermatozoi di muoversi liberamente. Il campione viene osservato su un unico piano focale.
Griglia	La griglia è sul copri-vetrino. Questo elimina il bisogno di inserire la griglia nell'oculare del microscopio e rimuoverla quando non è necessaria.
Economico	Riutilizzabile. Facile da pulire con una soluzione disinfettante senza candeggina.
Auto-controllo	L'osservazione delle frange di colore ai quattro punti di contatto, fornisce un test di auto-controllo per la precisione. Il copri-

vetrino non deve mai essere sollevato.

Calibrazione non necessaria Può essere riutilizzata ripetutamente con assoluta precisione senza calibrazione.

Tecnologia superiore Prodotto da ingegneria di precisione allo stato dell'arte. Controllata individualmente da raggio laser per precisione e accuratezza.